

DOĞRU MASKE KULLANIMI

GİYERKEN



1
Ellerinizi su ve sabun ile 20 saniye boyunca iyice temizleyin.



2
Maskeyi takarken sadece lastiklerinden tutun.



3
Üst taraftaki metal şeridi burun köprüsünün üzerinde sabitleyin.



**MASKE
TAKARKEN**

4
Ağız ve çeneyi tam kapatacak, hava geçişine izin vermeyecek şekilde maskeyi genişletin.



**MASKE
TAKARKEN**

5
Maskeyi kullandığınız sürece dış yüzüne kesinlikle dokunmayın.



**MASKE
ÇIKARIRKEN**

Maskeyi lastiklerinden veya iplerinden tutarak çıkarın ve çöpe atın.

**MASKE
ÇIKARIRKEN**